

사용자 설명서

품 목 명 : 재사용가능의료용검자

수입품목신고번호 : 수신 17-1003 호

상 품 명 : LASCHAL Forceps

제조외뢰자/소재지/국가 : LASCHAL SURGICAL / PO BOX 392, 120 KISCO AVENUE, MOUNT KISCO, NY 10549, USA / 미국

제조자/소재지/국가 : METALLON, INC. / 1415 Waterbury Road, Thomaston, CT 06787, USA / 미국

수입원의 상호 및 주소 : 웰메디칼

인천광역시 계양구 황어로 133, 3층 303호

Tel : 070-7762-0890, Fax : 050-4470-0890, Website: <http://wellmedical.co.kr>

사용목적 (INDICATIONS FOR USE)

진료시 조직을 잡거나 조작, 압박, 절단 또는 결합하기 위해 일반적으로 사용하는 검자로서 재사용이 가능하다.

사용방법 (DIRECTIONS FOR USE)

1. 사용 전 준비사항

- ① 제품 외관에 이물질 및 파손 여부를 점검한다.
- ② 사용 전에 반드시 멸균하여 사용하도록 한다.
(멸균방법 : 고압증기멸균(Autoclave) / 멸균 조건 : 132°C, 15분)

2. 사용방법

- ① 진료시 조직이나 물체를 잡거나 조작, 압박, 절단 또는 결합하기 위해 일반적으로 사용하는 검자로서 재사용이 가능하다.
- ② 사용 목적에 알맞은 말단 팁을 가진 제품을 선택하여 사용한다.
- ③ 과도한 힘을 주지 않고 적절한 힘과 강도로 사용한다.
- ④ 반드시 정해진 용도로만 사용하며, 이외의 용도로는 사용하지 않도록 한다.

3. 사용 후 보관 및 관리방법

- ① 제품을 사용한 후에는 혈액이나 잔유물 등을 제거하기 위해서 금속성이 아닌 플라스틱이나 나일론 소재의 브러쉬를 사용하여 세척한다.
- ② 깨끗하게 세척한 후, 완전히 건조시켜 실온의 건조한 곳에 보관한다.

사용시 주의사항

- ① 본 제품은 사용 전 반드시 멸균되어야 한다.
- ② 시술자는 시술 전에 제품의 손상 여부를 확인해야 한다.
- ③ 정해진 용도로만 사용하고, 부식, 크랙이 발견되면 사용을 금한다.
- ④ 세척 및 소독용 화학물질의 농도, 온도, 노출시간 등에 대하여 제조자의 지시사항을 준수한다.
- ⑤ 제품에 필요이상의 힘을 가하지 않도록 한다.

유효기간 : 해당사항 없음

보관조건 및 저장방법 : 실온의 건조한 곳에서 보관한다.

본 제품은 의료기기임

작성년월 : 2018년 1월