

사용자 설명서

품 목 명 : 치과용매트릭스고정기

수입품목신고번호 : 수신 19-531 호

상 품 명 : Wagotrix

제조사/소재지/국가 : GoldenDent / 27115 Gratiot Avenue, Suite B Roseville, Michigan 48066. USA / 미국

수입원의 상호 및 주소 : 웰메디칼

인천광역시 계양구 황어로 133, 3층 303호

Tel : 070-7762-0890, Fax : 050-4470-0890, Website: <http://wellmedical.co.kr>

사용목적 (INDICATIONS FOR USE)

인접면 와동 수복에 사용하는 매트릭스 밴드를 고정하는 기구

사용방법 (DIRECTIONS FOR USE)

1. 사용 전 준비사항

- ① 제품 외관의 이물질 및 파손 여부를 점검한다.
- ② 적용할 치아의 크기에 따라 적절한 사이즈의 제품을 선택한다.
- ③ 러버댐이나 비슷한 기능의 제품으로 격리조치를 하여 시술 중 부주의에 의한 흡입을 예방한다.

2. 사용방법

- ① 매트릭스고정기를 링포셉으로 적절히 벌린후 링의 말단부가 치은과 웨지에 닿을 만한 위치에서 링포셉을 풀어 매트릭스밴드를 고정시킨다.
- ② 필요에 따라 수복할 치아의 양방향으로 매트릭스고정기를 사용할 수 있다.
- ③ 치아의 수복이 완료되면 매트릭스고정기를 제거한다.

3. 사용 후 보관 및 관리방법

- ① 제품을 사용한 후에는 혈액이나 잔여물 등을 제거하기 위해서 금속성이 아닌 플라스틱이나 나일론 소재의 브러쉬를 사용하여 세척한다.
- ② 재사용을 위해 증기멸균(ISO 17665-1,2) 한다. (132°C/6분간)
- ③ 멸균 후 완전히 건조시켜 실온의 건조한 곳에 보관한다.
- ④ 5~10회 정도의 재사용이 가능하나 제품의 탄성이 저하되면 재사용하지 않고 폐기한다.

사용시 주의사항

- ① 재사용을 위해 증기멸균 한다.
- ② 멸균 후 완전히 건조시켜 실온의 건조한 곳에 보관한다.
- ③ 5~10회 정도의 재사용이 가능하나 제품의 탄성이 저하되면 재사용하지 않고 폐기한다.

본 제품은 의료기기임

작성년월 : 2019년 3월