

사용자 설명서

품 목 명 : 치과용매트릭스밴드

수입품목신고번호 : 수신 19-555 호

상 품 명 : Wagotrix

제조사/소재지/국가 : GoldenDent / 27115 Gratiot Avenue, Suite B Roseville, Michigan 48066. USA / 미국

수입원의 상호 및 주소 : 웰메디칼

인천광역시 계양구 황어로 133, 3층 303호

Tel : 070-7762-0890, Fax : 050-4470-0890, Website: <http://wellmedical.co.kr>

사용목적 (INDICATIONS FOR USE)

매트릭스 고정기에 끼워서 인접면 와동 수복에서 지지역할을 하는 재료

사용방법 (DIRECTIONS FOR USE)

1. 사용 전 준비사항

- ① 제품 외관의 이물질 및 파손 여부를 점검한다.
- ② 적용할 치아의 크기에 따라 적절한 사이즈의 제품을 선택한다.
- ③ 러버댐이나 비슷한 기능의 제품으로 격리조치를 하여 시술 중 부주의에 의한 흡입을 예방한다.

2. 사용방법

- ① 적절한 크기의 매트릭스밴드를 선택한후 핀홀더 기구류를 이용하여 탭부분을 잡고 수복할 치간사이에 끼워 넣는다.
- ② 탭 부분을 수복할 치아의 반대방향으로 구부린다.
- ③ 치아의 수복이 완료되면 매트릭스밴드를 제거한다.

3. 사용 후 보관 및 관리방법

일회용이므로 재사용하지 않는다.

사용시 주의사항

- 사용전 제품을 보관시에는 실온의 건조한 곳에서 청결하게 보관한다.
- 사용전 제품의 외관상태를 확인한다. 제품이 손상 또는 기형일 경우 사용을 금지한다.
- 사용전 제품의 청결상태를 확인한다. 필요할 경우 고압증기멸균 (132°C, 15분간)한다.
- 본 제품은 일회용 의료기기이다. 환자감염이나 교차감염을 방지하기 위하여 재사용을 금지한다. 사용후에는 폐기한다.
- 정해진 용도 이외의 목적으로 무리하게 사용하지 않는다.

본 제품은 의료기기임

작성년월 : 2019년 3월