

사용자 설명서

품 목 명 : 치과용 매트릭스웨이

수입품목신고번호 : 수신 19-530 호

상 품 명 : Wagotrix

제조사/소재지/국가 : GoldenDent / 27115 Gratiot Avenue, Suite B Roseville, Michigan 48066. USA / 미국

수입원의 상호 및 주소 : 웰메디칼

인천광역시 계양구 황어로 133, 3층 303호

Tel : 070-7762-0890, Fax : 050-4470-0890, Website: <http://wellmedical.co.kr>

사용목적 (INDICATIONS FOR USE)

치과 진료 시 치간을 분리하거나 치아 인접면을 격리하기 위해 치간부에 삽입하는 기구

사용방법 (DIRECTIONS FOR USE)

1. 사용 전 준비사항

- ① 제품 외관의 이물질 및 파손 여부를 점검한다.
- ② 적용할 치아의 크기에 따라 적절한 사이즈의 제품을 선택한다.
- ③ 러버댐이나 비슷한 기능의 제품으로 격리조치를 하여 시술 중 부주의에 의한 흡입을 예방한다.

2. 사용방법

- ① 매트릭스웨이를 핀홀더 기구류를 이용하여 치간사이에 끼워 넣어서 치간이 약간 이격되도록 한다.
- ② 필요에 따라 수복할 치아의 양방향으로 매트릭스웨이를 사용할 수 있다.
- ③ 치아의 수복이 완료되면 매트릭스웨이를 제거한다.

3. 사용 후 보관 및 관리방법

일회용이므로 재사용하지 않는다.

사용시 주의사항

1. 해당제품은 일회용이므로 재사용하지 않는다.