

사용자 설명서

품 목 명 : 치과치료용핀셋

수입품목신고번호 : 수신 19-532 호

상 품 명 : Wagotrix

제조사/소재지/국가 : GoldenDent / 27115 Gratiot Avenue, Suite B Roseville, Michigan 48066. USA / 미국

수입원의 상호 및 주소 : 웰메디칼

인천광역시 계양구 황어로 133, 3층 303호

Tel : 070-7762-0890, Fax : 050-4470-0890, Website: <http://wellmedical.co.kr>

사용목적 (INDICATIONS FOR USE)

치과에서 구강내에 사용되는 핀셋

사용방법 (DIRECTIONS FOR USE)

1. 사용 전 준비사항

- ① 제품 외관의 이물질 및 파손 여부를 점검한다.
- ② 사용 전에 멸균하여 사용한다.
(멸균방법 : 고압증기멸균(Autoclave) / 멸균 조건 : 132°C, 15분)

2. 사용방법

* WGPH(핀홀더)

- ① 핀홀더의 말단부로 매트릭스밴드의 탭 또는 매트릭스웨지의 홀딩부를 잡고 치간사이에 삽입한다.

* WGRF(링포셉)

- ① 링포셉의 말단부를 매트릭스고정기의 결찰홈에 결찰하고 링포셉의 손잡이를 움켜쥐어 매트릭스고정기를 벌린다.

- ② 링포셉의 손잡이를 풀면서 매트릭스고정기가 닫히도록 한다.

* 반드시 정해진 용도로만 사용하며 다른 용도로 무리하게 사용하지 않는다.

3. 사용 후 보관 및 관리방법

- ① 제품을 사용한 후에는 혈액이나 잔유물 등을 제거하기 위해서 금속성이 아닌 플라스틱이나 나일론 소재의 브러시를 사용하여 세척한다. 제품의 세척 및 소독 방법은 해당 국가의 지침을 준수한다.
- ② 깨끗하게 세척한 후 완전히 건조시켜 실온의 건조한 곳에 보관한다.

사용시 주의사항

- ① 사용시 과도한 힘을 주어서는 안된다.
- ② 시술자는 시술 전에 제품의 손상 여부를 확인해야 한다.

본 제품은 의료기기임

작성년월 : 2019년 3월