

# 사용자 설명서

품 목 명 : 발치용검자

수입품목신고번호 : 수신 19-166 호

상 품 명 : Physics Forceps

제조사/소재지/국가 : GoldenDent / 27115 Gratiot Avenue, Suite B Roseville, Michigan 48066. USA / 미국

수입원의 상호 및 주소 : 웰메디칼

인천광역시 계양구 황어로 133, 3층 303호

Tel : 070-7762-0890, Fax : 050-4470-0890, Website: <http://wellmedical.co.kr>

## 사용목적 (INDICATIONS FOR USE)

치과에서 치아를 잡고 발치하는 수동식 기구

## 사용방법 (DIRECTIONS FOR USE)

### 1. 사용 전 준비사항

- ① 제품 외관에 이물질 및 파손 여부를 점검한다.
- ② 사용 전에 반드시 멸균하여 사용하도록 한다.  
(멸균방법 : 고압증기멸균(Autoclave) / 멸균 조건 : 132°C, 15분)

### 2. 사용방법

- ① 발치할 치아에 적합한 피직스포셉 모델을 선택한다.
- ② 선택한 피직스포셉의 범퍼부에 범퍼를 장착한다.
- ③ 피직스포셉의 손잡이를 넓게 벌린후 비크의 끝부분을 설측(또는 순측)의 잇몸고랑위치 부근의 치근에 접촉시키고, 범퍼부는 순측(또는 설측)의 치근 하단 부근의 잇몸에 접촉시킨다.
- ④ 핸들을 적당하고 일정한 힘으로 지속적으로 움켜쥐면서 약 2~3분간 부동의 자세를 유지한다.  
이때 핸들을 너무 큰 힘으로 쥐어짜듯이 움켜쥐거나 팔을 움직이지않는다.
- ⑤ 지속적으로 힘을 가하는 중에 치아가 약 1~3mm 정도 움직였다면 이미 발치가 완료된 상태이다.  
일반 기구류를 이용하여 발치된 치아를 제거한다.
- ⑥ 반드시 정해진 용도로만 사용하며 다른 용도로 무리하게 사용하지 않는다.

### 3. 사용 후 보관 및 관리방법

- ① 제품을 사용한 후에는 혈액이나 잔유물 등을 제거하기 위해서 금속성이 아닌 플라스틱이나 나이론 소재의 브러쉬를 사용하여 세척한다.
- ② 깨끗하게 세척한 후 완전히 건조시켜 실온의 건조한 곳에 보관한다.

## 사용시 주의사항

- ① 본 제품은 사용 전 반드시 멸균되어야 한다.
- ② 사용시 과도한 힘을 주어서는 않된다.
- ③ 시술자는 시술 전에 제품의 손상 여부를 확인해야 한다.

본 제품은 의료기기임

작성년월 : 2019년 1월