

사용자 설명서

품 목 명 : 교정용검자

수입품목신고번호 : 수신 18-1617 호

상 품 명 : CHIRSTOM Orthodontics

제조회사/소재지/국가 : CHIRSTOM Marcin i Marek Dyner s.c. / Ul. Mstowska 8A, 42-240 Rudniki / 폴란드

제조사/소재지/국가 : CHIFA SP. Z.O.O. / ul. Tysiaclecia 14, 64-300 Nowy Tomysl / 폴란드

수입원의 상호 및 주소 : 웰메디칼

인천광역시 계양구 황어로 133, 3층 303호

Tel : 070-7762-0890, Fax : 050-4470-0890, Website: <http://wellmedical.co.kr>

사용목적 (INDICATIONS FOR USE)

치과 교정용 재료를 보호 유지하거나 금속편 또는 와이어를 굴곡 하기 위해 사용하는 기구로서 치아의 접착제를 제거하거나 치아와 교정용 재료를 분리하는 경우에도 사용된다.

사용방법 (DIRECTIONS FOR USE)

1. 사용 전 준비사항

- ① 제품 외관에 이물질 및 파손 여부를 점검한다.
- ② 사용 전에 반드시 멸균하여 사용하도록 한다.
(멸균방법 : 고압증기멸균(Autoclave) / 멸균 조건 : 132°C, 15분)

2. 사용방법

- ① 사용 전 준비 사항을 수행한 후 진료 및 치료 상황에 맞게 사용한다.
- ② 제품전체길이, 말단부 정면, 말단부 측면, 말단부 상세 형상 등을 고려하여 사용목적에 알맞은 제품을 선택하여 사용한다.
- ③ 사용목적에 알맞은 제품으로 교정용 재료를 굴곡, 절단, 분리, 이동 등 필요한 작업을 수행한다.
- ④ 반드시 정해진 용도로만 사용하며, 이외의 용도로는 사용하지 않도록 한다.

3. 사용 후 보관 및 관리방법

- ① 제품을 사용한 후에는 혈액이나 잔유물 등을 제거하기 위해서 금속성이 아닌 플라스틱이나 나이론 소재의 브러쉬를 사용하여 세척한다.
- ② 깨끗하게 세척한 후, 완전히 건조시켜 실온의 건조한 곳에 보관한다.

사용시 주의사항

- ① 본 제품은 사용 전 반드시 멸균되어야 한다.
- ② 사용시 과도한 힘을 주어서는 않된다.
- ③ 시술자는 시술 전에 제품의 손상 여부를 확인해야 한다.