

사용자 설명서

품 목 명 : 크라운제거용기자

수입품목신고번호 : 수신 17-500 호

상 품 명 : WAMKey

제조회사/소재지/국가 : WAM / Tech'Indus B21 645 rue Mayor de Montricher 13854 AIX-EN PROVENCE Cedex 3 FRANCE / 프랑스

제조사/소재지/국가 : CHIFA Sp. z o.o. / ul. Tysiaclecia 14, 64-300 Nowy Tomysl, POLAND / 폴란드

수입원의 상호 및 주소 : 웰메디칼

인천광역시 계양구 황어로 133, 3층 303호

Tel : 070-7762-0890, Fax : 050-4470-0890, Website: <http://wellmedical.co.kr>

사용목적 (INDICATIONS FOR USE)

치과에서 버를 이용하여 크라운을 절단한 후 크라운을 제거하는데 사용하는 기구

사용방법 (DIRECTIONS FOR USE)

1. 사용 전 준비사항

- ① 제품 외관에 이물질 및 파손 여부를 점검한다.
- ② 사용 전에 반드시 멸균하여 사용하도록 한다.
(멸균방법 : 고압증기멸균(Autoclave) / 멸균 조건 : 132°C, 15분)

2. 사용방법

- ① 지대치의 교합면과 크라운의 안쪽 측면 사이의 시멘트 레벨을 추정한다. 이론적으로, 이 레벨은 PFM의 상단보다 금속 크라운의 상단에 훨씬 가깝다. 시멘트 층을 볼 수 있는 창을 만든다. 이전에 추정했던 레벨에 거리, 구조물의 아래와 시멘트 레벨을 보기 위하여 드릴링을 시작한다.
- ② Cement Layer의 중앙 (거의 조제물질의 수직방향으로)까지 drill을 위치시킨다.
- ③ WAMkey #1 작업 부분 (1.8mm로-0.071in)의 큰 부분을 넣을 수 있도록 하기 위해 수평 홈에 구멍을 확장한다. 이 슬롯의 최종 형태는 타원형이 아닌 원형이어야 한다. 넓은 터널은 어떠한 일부 경우에 도움이 될 수 있다.
- ④ 버와 크라운의 교합면 사이에 물질의 잔류 부분이 없는 것을 확인해야 한다. 이전에 WAMkey#1 주변에 삽입했던 Endo Stop으로 tunnel이 충분히 깊은지 확인해야 한다. 사실, 깊이와 slot의 폭은 기기 전체 작동 부위의 삽입을 가능하게 한다.
- ⑤ Slot의 바닥까지 WAMkey#1을 삽입한다. 전체 작업 부분은 크라운의 두께를 통과해야 한다. 조심스럽게 크라운을 제거하기 위하여 기기의 핸들을 비튼다. 대부분의 경우 WAMkey#1은 크라운을 제거할 수 있다. 돌렸을 때, 느슨해진 경우(eg. Slot이 너무 크거나, 기기의 압력에 의해 아말감이 무너진 경우) WAMkey#2 또는 #3을 이용하여 크라운을 제거한다. 만약, 비정상적인 저항을 느끼는 경우, 기기가 폭 감지의 breathe 할 수 있도록 Slot을 확대하는 것을 망설이지 말아야 한다. 저항은 크라운 조정의 높은 level 때문일 수 있습니다. 이 문제는 일반적으로 높고 큰 크라운 (어금니)에서 나타난다. 따라서 WAMkey #1과 2에 힘을 가하는 것을 시도하지 말아야 한다. Slot을 확대하기 위하여 WAMkey#3을 넣고 그것을 다시 시도할 수 있다.

3. 사용 후 보관 및 관리방법

- ① 제품을 사용한 후에는 혈액이나 잔유물 등을 제거하기 위해서 금속성이 아닌 플라스틱이나 나일론 소재의 브러쉬를 사용하여 세척한다.
- ② 깨끗하게 세척한 후, 완전히 건조시켜 실온의 건조한 곳에 보관한다.

사용시 주의사항

- ① 본 제품은 사용 전 반드시 멸균되어야 한다.
- ② 사용시 과도한 힘을 주어서는 안 된다.
- ③ 시술자는 시술 전에 제품의 손상 여부를 확인해야 한다.
- ④ 반드시 전문의에 의해 사용되어야 한다.

유효기간 : 해당사항 없음

보관조건 및 저장방법 : 실온의 건조한 곳에서 보관한다.

본 제품은 의료기기임

작성년월 : 2018년 1월