

사용자 설명서

품 목 명 : 크라운제거용검자

수입품목신고번호 : 수신 17-558 호

상 품 명 : WAM'X

제조회자/소재지/국가 : WAM / Tech'Indus B21 645 rue Mayor de Montricher 13854 AIX-EN PROVENCE Cedex 3 FRANCE / 프랑스

제조사/소재지/국가 : Chifa Sp. z o.o. / ul. Budowlanych 1a, 21-300 Radzyn Podlaski, POLAND / 폴란드
CHIFA Sp. z o.o. / ul. Tysiaclecia 14, 64-300 Nowy Tomysl, POLAND / 폴란드

수입원의 상호 및 주소 : 웰메디칼
인천광역시 계양구 황어로 133, 3층 303호
Tel : 070-7762-0890, Fax : 050-4470-0890, Website: <http://wellmedical.co.kr>

사용목적 (INDICATIONS FOR USE)

치과에서 버를 이용하여 크라운을 절단한 후 크라운을 제거하는데 사용하는 기구

사용방법 (DIRECTIONS FOR USE)

1. 사용 전 준비사항

- ① 제품 외관에 이물질 및 파손 여부를 점검한다.
- ② 사용 전에 반드시 멸균하여 사용하도록 한다.
(멸균방법 : 고압증기멸균(Autoclave) / 멸균 조건 : 132°C, 15분)

2. 사용방법

- ① 치근과 크라운 사이의 틈새 공간을 추정한다. 상태를 파악하기 위하여 몇 개의 X-ray를 촬영한다. 포스트 돌레로 "U"형태의 공간을 만들고, 천천히 포스트를 구분시킨다. 그리고 생선된 공간과 치근의 교합면 사이의 이물질을 제거한다. 선택된 프롱(Prongs)은 이 공간에 떠 있을 수 있어야 한다. 최대 출력으로 포스트의 모든 돌레를 스프레이를 사용/미사용 상태로 교대하면서 1~2분간 초음파를 분사한다.
- ② 포스트나 치근이 손상하지 않도록 치아 양 쪽 면 특히 협측 면에 포크의 움직임을 방해하는 물체가 없는지 확인한다. 적절한 크기의 실리콘 슬라이스를 선택한다. 절단 기구 (예, 메스, 수술용 가위 등)를 이용하여 선택된 슬라이스에 틈을 만든다. 포스트 주위에 슬라이스를 넣는다. 프롱을 마주보도록 장착한다.
- ③ 스톱 나사를 1바퀴 툰다. 이것은 조금씩 부드럽게 포스트를 제거하기 위해서이다. 느슨하게 플라이어를 유지하고, 가능한 범위까지 프롱(Prongs)을 부드럽게 넣는다. 포스트가 분리될 때 튀겨 나오는 것을 방지하기 위하여 보철물의 상단을 강하게 누른 상태에서 플라이어 손잡이를 꼭 잡는다. 양 쪽 프롱(Prongs)의 이격 거리는 기등을 제거하기에 충분해야 한다. 만약 이격이 충분하지 않은 경우, 구강 밖에서 WAM'X를 잡고 스톱 나사를 아주 약간 (최대 1~1.5바퀴) 툰다. 치근과 코어 사이에 프롱(Prongs)을 다시 밀어 넣고 플라이어 손잡이를 꼭 잡는다. 보철물이 제거될 때까지 이 활동을 반복한다.

3. 사용 후 보관 및 관리방법

- ① 제품을 사용한 후에는 혈액이나 잔유물 등을 제거하기 위해서 금속성이 아닌 플라스틱이나 나일론 소재의 브러쉬를 사용하여 세척한다.
- ② 깨끗하게 세척한 후, 완전히 건조시켜 실온의 건조한 곳에 보관한다.

사용시 주의사항

- ① 본 제품은 사용 전 반드시 멸균되어야 한다.
- ② 사용시 과도한 힘을 주어서는 안 된다.
- ③ 시술자는 시술 전에 제품의 손상 여부를 확인해야 한다.

유효기간 : 해당사항 없음

보관조건 및 저장방법 : 실온의 건조한 곳에서 보관한다.

본 제품은 의료기기임

작성년월 : 2018년 1월