

사용자설명서

품 목 명 : 재사용가능범용수동식의료용핀셋

수입품목신고번호 : 수신 17-563 호

상 품 명 : WAM Tweezers

제조회사/소재지/국가 :

WAM / Tech'Indus B21 645 rue Mayor de Montricher 13854 AIX-EN PROVENCE Cedex 3 FRANCE / 프랑스

제조사/소재지/국가 : Chifa Sp. z o.o. / ul. Budowlanych 1a, 21-300 Radzyn Podlaski, POLAND / 폴란드
CHIFA Sp. z o.o. / ul. Tysiaclecia 14, 64-300 Nowy Tomysl, POLAND / 폴란드
PROGRESS / ZI des Bourguignons 84400 APT, France / 프랑스

수입원의 상호 및 주소 : 웰메디칼

인천광역시 계양구 황어로 133, 3층 303호

Tel : 070-7762-0890, Fax : 050-4470-0890, Website: <http://wellmedical.co.kr>

사용목적 (INDICATIONS FOR USE)

진료시에 일반적으로 사용되는 핀셋으로 재사용이 가능하다.

사용방법 (DIRECTIONS FOR USE)

1. 사용 전 준비사항

- ① 제품 외관에 이물질 및 파손 여부를 점검한다.
- ② 사용 전에 반드시 멸균하여 사용하도록 한다. (단, GEKP5는 제외한다)
(멸균방법 : 고압증기멸균(Autoclave) / 멸균 조건 : 132℃, 15분)

2. 사용방법

- ① 핀셋을 열 때에는 손잡이 뒷부분을 누른다.
- ② 핀셋을 닫을 때에는 손잡이 뒷부분을 누르지 않으면 된다.
- ③ 미끄러지기 쉬운 물체의 경우 실리콘 팁(GEKEM20)이나 튜브의 반죽형 실리콘(GEKP5)을 추출하여, GEKT 핀셋의 끝에 부착하여 사용한다.

3. 사용 후 보관 및 관리방법

- ① 제품을 사용한 후에는 혈액이나 잔유물 등을 제거하기 위해서 금속성이 아닌 플라스틱이나 나이론 소재의 브러쉬를 사용하여 세척한다.
- ② 깨끗하게 세척한 후, 완전히 건조시켜 실온의 건조한 곳에 보관한다.

사용시 주의사항

- ① 본 제품은 사용 전 반드시 멸균되어야 한다. (단, GEKP5는 제외한다)
- ② 사용시 과도한 힘을 주어서는 안 된다.
- ③ 시술자는 시술 전에 제품의 손상 여부를 확인해야 한다.
- ④ 반드시 전문의에 의해 사용되어야 한다.

유효기간 : 해당사항 없음

보관조건 및 저장방법 : 실온의 건조한 곳에서 보관한다.

본 제품은 의료기기임

작성년월 : 2018년 1월