

# 사용자설명서

**품 목 명 :** 재사용가능의료용검자

**수입품목신고번호 :** 수신 17-678 호

**상 품 명 :** RAPTOR

**제조회사/소재지/국가 :**

WAM / Tech'Indus B21 645 rue Mayor de Montricher 13854 AIX-EN PROVENCE Cedex 3 FRANCE / 프랑스

**제조사/소재지/국가 :** Chifa Sp. z o.o. / ul. Budowlanych 1a, 21-300 Radzyn Podlaski, POLAND / 폴란드  
CHIFA Sp. z o.o. / ul. Tysiaclecia 14, 64-300 Nowy Tomysl, POLAND / 폴란드

**수입원의 상호 및 주소 :** 웰메디칼

인천광역시 계양구 황어로 133, 3층 303호

Tel : 070-7762-0890, Fax : 050-4470-0890, Website: <http://wellmedical.co.kr>

## 사용목적 (INDICATIONS FOR USE)

진료시 조직을 잡거나 조작, 압박, 절단 또는 결합하기 위해 일반적으로 사용하는 검자로서 재사용이 가능하다.

## 사용방법 (DIRECTIONS FOR USE)

### 1. 사용 전 준비사항

- ① 제품 외관에 이물질 및 파손 여부를 점검한다.
- ② 사용 전에 반드시 멸균하여 사용하도록 한다.  
(멸균방법 : 고압증기멸균(Autoclave) / 멸균 조건 : 132°C, 15분)

### 2. 사용방법

- ① 말단부는 특히 조그만 크기의 물체를 견고히 잡을 때에 유용하다. 조그만 조각, 파손된 기구류, 바늘 등을 견고히 잡을 때에 용이하다.
- ② 손잡이부는 LOCK/UN-LOCK 기능이 있어서 말단부가 물체를 견고히 잡을 수 있도록 한다.
- ③ 조작법을 반드시 숙지하고 사용한다.

### 3. 사용 후 보관 및 관리방법

- ① 제품을 사용한 후에는 혈액이나 잔유물 등을 제거하기 위해서 금속성이 아닌 플라스틱이나 나이론 소재의 브러쉬를 사용하여 세척한다.
- ② 깨끗하게 세척한 후, 완전히 건조시켜 실온의 건조한 곳에 보관한다.

## 사용시 주의사항

- ① 본 제품은 사용 전 반드시 멸균되어야 한다.
- ② 사용시 과도한 힘을 주어서는 않된다.
- ③ 시술자는 시술 전에 제품의 손상 여부를 확인해야 한다.

**유효기간 :** 해당사항 없음

**보관조건 및 저장방법 :** 실온의 건조한 곳에서 보관한다.

본 제품은 의료기기임

작성년월 : 2018년 1월